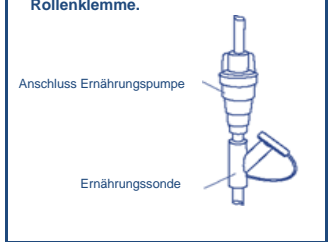
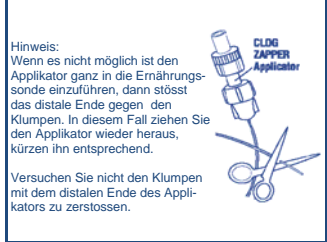
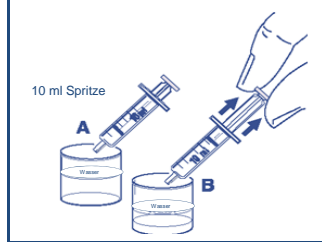
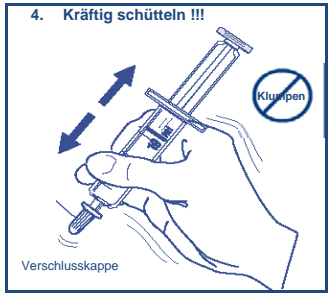



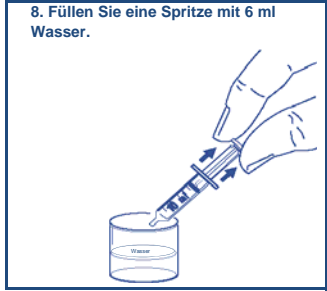

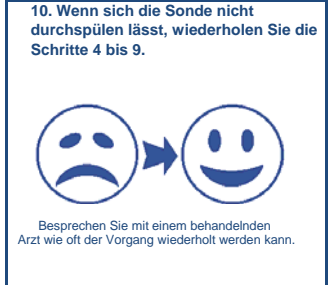



CLOG ZAPPER BEDIENUNGSANLEITUNG

Anwendung bei NG und D-Sonden

<p>1. Schalten Sie die Ernährungspumpe aus und verschließen Sie die Rollenklammer.</p>  <p>Anschluss Ernährungspumpe Ernährungssonde</p>	<p>2. Führen Sie den CLOG ZAPPER Applikator in die Ernährungssonde ein.</p> <p>Hinweis: Wenn es nicht möglich ist den Applikator ganz in die Ernährungssonde einzuführen, dann stößt das distale Ende gegen den Klumpen. In diesem Fall ziehen Sie den Applikator wieder heraus, kürzen ihn entsprechend.</p> <p>Versuchen Sie nicht den Klumpen mit dem distalen Ende des Applikators zu zerstoßen.</p>  <p>CLOG ZAPPER Applikator</p>	<p>3. Füllen Sie die CLOG ZAPPER Spritze bis zur 10 ml Markierung mit Wasser.</p>  <p>10 ml Spritze</p>
<p>4. Kräftig schütteln !!!</p>  <p>Klumpen</p> <p>Verschlusskappe</p>	<p>5. Geben Sie langsam die empfohlene Dosis von 2 - 5 ml CLOG ZAPPER in die Ernährungssonde.</p>  <p>Ernährungssonde</p>	<p>6. Entfernen Sie den Applikator aus der Ernährungssonde.</p>  <p>Sonde schließen</p> <p>Bewahren Sie Spritze und Applikator beim Patienten auf, für den Fall, dass die Prozedur wiederholt werden muss.</p>
<p>7. Lassen Sie die Lösung für 60 Minuten in der Ernährungssonde einwirken.</p>  <p>MINDESTENS 30 MINUTEN</p>	<p>8. Füllen Sie eine Spritze mit 6 ml Wasser.</p>  <p>Wasser</p>	<p>9. Spülen Sie die Sonde mit 6 ml Wasser!</p>  <p>Ernährungssonde</p>
<p>10. Wenn sich die Sonde nicht durchspülen lässt, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.</p>  <p>Besprechen Sie mit einem behandelnden Arzt wie oft der Vorgang wiederholt werden kann.</p>	<p>11. Nachdem die Sonde wieder durchgängig ist...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung gemäß Klinikprotokoll - und SETZEN SIE DIE ERNÄHRUNG FORT  <p>ENTSORGUNG</p>	<p>ACHTUNG Die Nutzung einer Schutzbrille wird dringend empfohlen, CLOG ZAPPER kann zu Reizungen führen, wenn es in Kontakt mit den Augen kommt.</p> <p>LAGERUNGSBEDINGUNGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CLOG ZAPPER sollte innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden, nachdem es vermischt wurde. ▪ Mixtur KÜHL LAGERN bis zum erneuten Gebrauch.

Anwendung bei Gastrostomie Sonden

- Schneiden Sie den Applikator auf Höhe des Punktes ab.
- Entsorgen Sie den überschüssigen Schlauch.
- Führen Sie den Applikator in den Gastrostomie Sonden Ansatzkonnektor ein.
- Fahren Sie mit den oben beschriebenen Schritten für NG und D-Sonden fort.

Anwendung flach anliegenden Sonden

- Setzen Sie das Nahrungsset gemäß den Angaben des Herstellers in die Sonde ein.
- Führen Sie den Applikator in das Nahrungsset ein.
- Fahren Sie mit den oben beschriebenen Schritten für NG und D-Sonden fort.